



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

LM-200 - LM-350+



TD-07-ES-200-350-PLUS-08-23-V01

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG ELSCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner elscooteren har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg












INDHOLDSFORTEGNELSE

Forklaring af symboler	Side 4-5
Introduktion	Side 6
Sikkerhed/Forholdsregler	Side 7
Sådan oplader du din Lindebjerg elscooter	Side 8
Sådan kører du sikkert Lindebjerg elscooter	Side 9-10
Instrumentbord	Side 12
Instrumentbord betjening.....	Side 13
Batteri og frikopling	Side 14
Få mere ud af dit batteri	Side 15
Sædetype.....	Side 16-17
Sådan indstiller du din Lindebjerg elscooter	Side 18
Fejlsøgning	Side 19
Garanti og service.....	Side 22
Serviceskema.....	Side 23

FORKLARING AF SYMBOLER

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugermanual, på produktet eller på emballagen.

Betegnelse	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Fabrikant		Fabrikant af medicinsk udstyr	Mærkat
CE- mærkning		Produkter mærket med dette symbol, er i overensstemmelse med alle relevante EU lovkrav til medicinsk udstyr	Mærkat Brugermanual
Medicinsk udstyr		Produktet er medicinsk udstyr klasse 1	Mærkat
Brugermanual		Læs brugsanvisning inden brug!	Mærkat Brugermanual
Reference nummer		Internt varenummer	Mærkat
Lot nummer		Sporbarheds identifikation	Mærkat
Serienummer		Sporbarheds identifikation	Mærkat
Belastning		Max brugervægt	Mærkat
Afskaffelse		Produktet må ikke smides ud som usorteret affald, men skal sendes til særlige indsamlingsfaciliteter, hvor det bliver genudvundet og genanvendt.	Mærkat

Betegnelsen	Symbol	Beskrivelse	Anvendt på
Frikopling		Frikopling af motorbremsen	Mærkat
Fremstilling		Fremstillingsland	Mærkat
Bortskaffelse		Ved bortskaffelse af produkt	Mærkat
Rygning		Rygning i nærheden af scooteren er forbudt	Mærkat
Åben ild forbudt		Åben ild tæt på scooteren forbudt	Mærkat

INTRODUKTION

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.



Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarseloplysninger, samt vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union.

Mærkat

Elscooter		TD-ES-000-01-23-V01	
REF 00000	Hastighed: km/t		
LOT ES-0000-0000	Produkt Type: Klasse C		
Max. brugervægt: kg	Batteri: 12 volt AGM - Gastæt blybatteri		
Max. belastning: kg	Dæktryk: 2,5 – 3 bar		
Egenvægt: kg			
			LINDEBJERG AS Stensgaardvej 14, DK-5500 Middelfart www.lindebjerg.dk

Produktsortiment

Produktnavn	Varenr.
LM-200 - Rød	122001
LM-300 - Rød	123001-A
LM-300 - Blå	123002-A
LM-350 - Rød	123501-A
LM-350 - Grå	123503
LM-300+ - Rød	123001-A+
LM-300+ - Blå	123002-A+
LM-350+ - Rød	123501-A+
LM-350+ - Blå	123502-A+

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

1

Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Kør aldrig over 6 km/t på fortov, gågader eller indendørs.
- Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personskader, som opstår ved forkert benyttelse.

2

Batteri instruktioner:

VIGTIG! Læs opladningsinstruktionerne på side 8 og 14 før køretøjet tages i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så tit som muligt. (Max 5 dage uden opladning).

Hvis scooters batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

3

Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt.
Sæt elscooteren til opladning.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 2,5 – 3 bar.
Rengør sæde og plastikskjold med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

Årligt:

Det anbefales at få service din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

SÅDAN OPLADER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

4

Opladning

For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som følger med ved levering. Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.



Oplader LM-200 - LM-350+: 111109 - Oplader 24V, 5A
Vejrbestandig oplader: 111110 - Oplader 24V, 8A, vejrbestandig

Tryk på "I" på opladerens tænd/sluk knap. Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul. Når opladningen er fuldenendt, vil den gule lysdiode skifte til grøn.



Du skal sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Så du kan sagtens lade scooteren stå til strøm hele tiden.

Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt, skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker. Lad ikke scooteren stå uden oplader tilsluttet i mere en 5 dage. Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

BEMÆRK: Oplades der i fugtige miljøer, skal der tilvælges en vejrbestandig oplader, for at garantien på opladeren vil gælde.

SÅDAN KØRER DU SIKKERT LINDEBJERG ELSCOOTER

**Vigtigt! Inden kørsel bør du kontrollere at køretøjet er i forsvarlig stand –
Tjek at du har det korrekte lufttryk i dine dæk ca. (2,5 – 3 bar) og at lys, bremses og styretøj fungerer**

5 Før kørsel:

- Tjek altid at scooteren er slukket, før du sætter dig op på den.
- Tjek at sidespejlene er indstillet korrekt.
- Husk at tage armlænene ned inden kørsel. De kan nemt tage op og ned for nem indstigning på scooteren.
- Har du benyttet drejefunktion på sædet, skal du sikre dig til det er i låst tilstand.

5 Tænd scooteren:

Du tænder nemt scooteren ved at sætte nøglen i tænding og dreje nøglen med uret rundt. Vent herefter 5 sekunder uden at trykke på knapper eller speederen, indtil der kommer lys i batteriindikatoren. Drej nøglen mod uret for at slukke den igen. (Sluk altid scooteren inden du træder ned.)



6 Lær scooteren at kende

Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Start med lav hastighed indtil du føler dig tryk med scooterens funktioner.



Bemærk – hvis du trykker stille og roligt vil du opnå en mere jævn kørsel. Undgå at trykke speederen hurtigt helt i bund eller slippe den i en hurtig bevægelse. Dette vil opleves som en kraftig acceleration og en kraftig nedbremsning.



Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

6

Hvor må jeg køre?



Fodgænger
0-6 km/t



Cyklist
6-15 km/t

Cyklist - 6-15 km/t.

Din scooter anses som værende en cykel i færdselsloven, når du kører over 6 km/t. Du skal derfor agere som cyklist i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden.

Fodgænger - 0-6 km/t.

Kører du med samme fart som en gående, under 6 km/t, må du køre på fortovet, på fodgængerovergange, i gågader, i butikker og storcentre. Alle steder hvor en fodgænger må færdes.

6

Tegngivning og lys

Bremselys: Når du slipper speederen, vil scooteren bremselys bagpå automatisk tænde. Bremselyset vil være tændt, indtil du trykker ind på speederen igen.

Blinklys: Når du skal dreje, kan du enten vælge at bruge scooteren indbygget blinklys eller du kan vælge at give tegn med hånden. Vi anbefaler vi at man giver tegn med hånden. Dette ses bedre af andre trafikanter end scooterens blinklys. Du tænder scooterens blinklys ved at trykke på henholdsvis „I“ og „II“. Du slukker blinklyset ved at knappen står i midten på „O“.

Kørellys: Da scooteren anses for at være en cykel, skal du køre med lyset tænd i lygtetændingstiden. Det er fra solnedgang til solopgang. Du trykker gang på „I“ på „Tænd/sluk lys“ knappen. Så tænder lyset foran og bagpå. Tryk „O“ på „Tænd/sluk lys“ knappen for at slukke lyset igen.




Blink til venstre

Blink til højre

Tænd/sluk lys



INSTRUMENTBORD

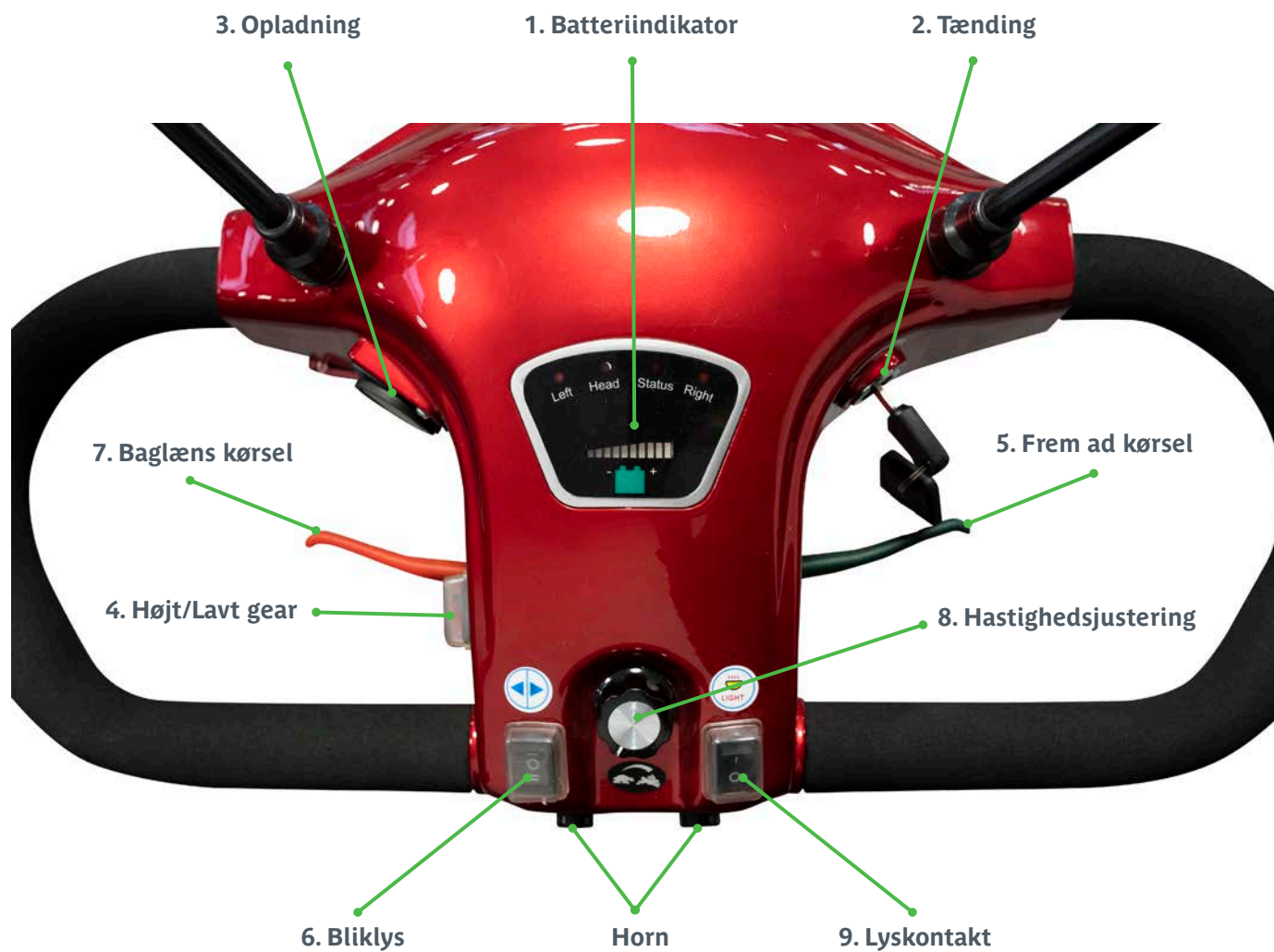

INSTRUMENTBORD BETJENING

1 Batteriindikator

Batteriindikatoren indikerer hvor meget strøm din scooter har tilbage. Ved fuld opladning lyser alle lamper i indikatoren. Lamperne slukkes en efter en, fra højre mod venstre. Når der kun er røde lamper tilbage som lyser, er det ved at være tid til at oplade scooteren igen. Indikatoren tager udgangspunkt i det aktuelle forbrug og derfor kan det, under kørsel, variere hvor mange lamper som lyser, f.eks. hvis man kører op ad en bakke og derefter kører ned igen. Bemærk at ved direkte sollys på indikatoren, kan det se ud til at kun de røde lamper lyser. Skyg evt. med en hånd for optimal aflæsning. Blinker indikatoren kan dette tyde på en fejl på scooteren, se mere om fejlfinding bagerst i manualen.

2 Tænding

Din scooter levers med ekstra nøgle(r). For at tænde scooteren placeres nøglen i nøglehullet og drejes i urets retning. Den røde klaralarm og batteriindikatoren vil lyse op. Der kan gå 2 sekunder før scooteren er klar til brug, rør derfor ikke ved speederen eller andre knapper på scooteren før efter 2 sekunder.

3 Opladning

Afhængig af model, sidder der et dæksel foran ladestikket, som skal drejes til siden. Undgå at trække ud i dækslet.

4 Højt/lavt gear

Scooteren er udstyret med 2 gear, et højt og et lavt. Hvis der køres i lavt gear, køre scooteren ca. den halve fart af max hastighed. Dette anbefales at benytte til nye brugere af elscootere.

5 Frem ad kørsel

Speederen trykkes ind/ned mod en selv, til højre for fremadkørsel. Denne speeder fungerer trinløst, dvs. at hvis man trykker halvt ind/ned mod sig, vil scooteren køre ca. halv hastighed.

6 Blinklys

For at blinke til venstre, skal du trykke på „I“ og for at blinke til højre skal du trykke på „II“. For at deaktivere blinklyset, skal knappen sættes tilbage i „0“.

7 Baglæns kørsel

Her gælder det samme som ved frem ad kørsel, hvis man trykke speederen ind/ned mod sig selv, til venstre, kører scooteren baglæns. Når speederen slippes, bremses scooteren selv igen.

8 Hastighedsjustering

På denne knap justeres scooterens tophastighed. Drej knappen med uret og tophastigheden øges, mod uret sænkes tophastigheden. Ved ændring i tophastigheden, ændres også scooteren accelerationsevne, som kan være en fordel ved nye brugere, samt ved kørsel steder hvor pladen er trang.

9 Lyskontakt

Tryk for at tænde og slukke lyset. Lyset skal være tændt i lygtetændingstiden. Ved stop, vil lyset stå tændt i baglygterne. Dette slukker ved igangsættelse.

BATTERI OG FRIKOPLING

9

Batteri informationer

Din scooter er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdes frie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens max rækkevidde, som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus eller lignende, vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes scooterens rækkevidde.


HUSK - Kør aldrig scooteren helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.

10

Frikopling

Skulle der opstå en situation hvor det bliver nødvendigt at skubbe med din scooter, skal du først frikoble scooterens motor. Dette gøres ved at trække op i frikoblingshåndtaget der findes under scooterens bagkåbe. På scooterens bagkåbe markeret med et "N/D" klistermærke. N = Frikoplet / D = Klar til at køre.

Vigtigt! Håndtaget skal være trykket i bund, for at scooteren kan køre. Er håndtaget ikke i bund vil scooteren ikke køre. Sluk scooteren, tryk håndtaget i bund og tænd igen for scooteren.

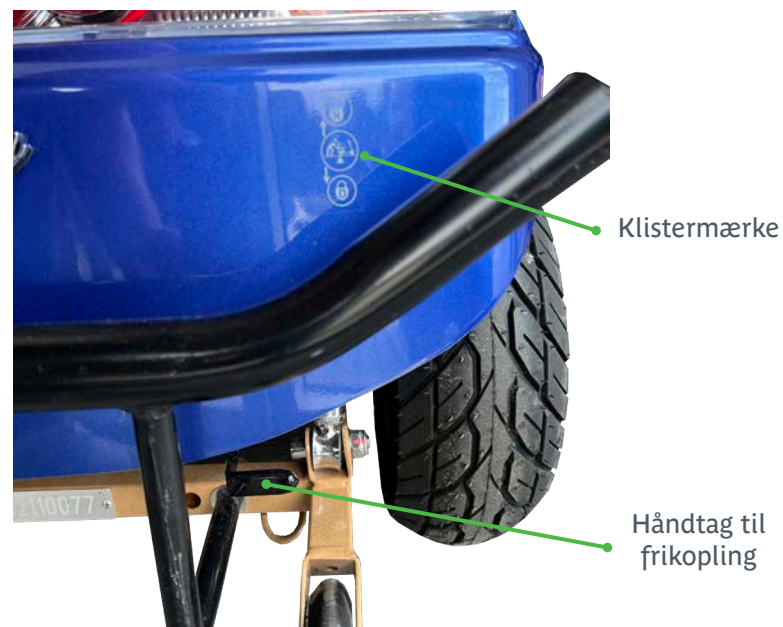

Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du skal altid genoplade batteriet efter hver køretur. Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre



SÆDETYPER

Kaptajn sæde:



Tilbehørsmontering

Kaptjansæde har mulighed for at få monteret Lindebjergs originale tilbehørs dele, via det integreret beslag i sædet. Lindebjergs aktuelle tilbehørs program kan ses i vores brochure og på www.lindebjerg.dk

Standard sæde:

Drej sædet ud til siden.

Skub håndtaget frem mod styret og drej herefter sædet ud til siden. Benyt også dette håndtag til afmontering af sædet.

Juster sæde frem/tilbage.

Træk op i håndtaget og skub sædet frem eller tilbage.




SÅDAN INDSTILLER DU DIN LINDEBJERG ELSCOOTER

7

Indstilling af styr

Scooteren er udstyret med justerbart styr, så du kan tilpasse den til dig. Træk ud i det lille sølvhåndtag i bunden af styrstammen og hold den ude. Træk/skub herefter i styret indtil du har fundet den ønskede indstilling. Slip det lille sølvhåndtag og træk/skub frem og tilbage i styret indtil den går i låst position.

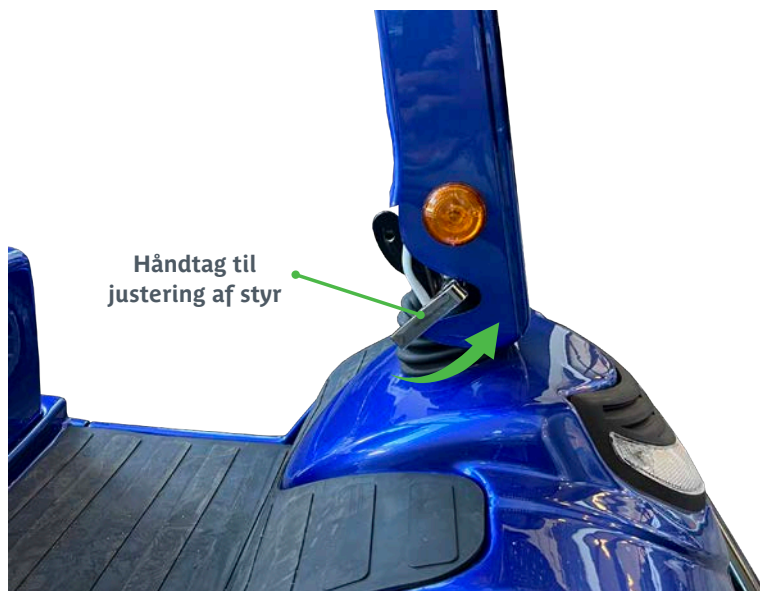

OBS! Tjek altid at styret er gået i låst position.

8

Ladestik

Scooteren ladestik sidder placeret på venstre side af styret, lige ved siden af høj/lav knappen. Her indsætter du den runde ende af opladeren. Vær opmærksom på om den bliver sat ordentligt ind. Husk at sætte scooteren til opladning efter hver endt tur.

Når du skal have opladeren ud, trækker du blot stikket ud.



FEJLSØGNING

Problem	Fejl	Løsning
Scooteren kan ikke køre. Den blinker en gang.	Batterispændingen er for lav.	Sæt scooteren til opladning.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 4 gange.	Motoren er frikoblet, så du kan skubbe med scooteren.	Sluk scooteren - Tryk håndtaget til frikobling af motor i bund. Tænd scooteren igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 6 gange.	Opladeren er forbundet til scooteren.	Sluk scooteren - Træk stikket ud af scooteren. Vent 2 sek. og tænd igen.
Scooteren kan ikke køre. Den blinker 7 gange.	Speederen er aktiveret for hurtigt eller står ikke neutral.	Sluk scooteren. Tænd herefter igen og vent ca. 2 sek. før speederen aktiveres.
Scooteren stopper pludseligt under kørsel.	Dårlig batteriforbindelse.	Tjek batteristik. Evt. kontakt Lindebjerg.
Scooteren taber fart under kørsel.	Dårlig forbindelse i fartpotentiometer.	Drej hastighedsjusteringsknap frem og tilbage, da forbindelsen kan forringes ved sjældnen brug.
Scooteren kører kort på en opladning.	Batteriet aflades for hurtigt pga. slitage, blødt underlag, kulde, eller meget start og stop.	Genoplad batterierne. Kør en tur på hårdt underlag. Skift evt. batterierne.
Scooteren vil ikke lade op.	Aflæsningsfejl.	Ladestatus skal ses på selve opladeren.
Scooteren vil ikke lade op, men kører fint.	Sikring er sprunget i opladeren.	Tjek sikring i oplader, evt. kontakt Lindebjerg.
Opladeren virker ikke.	Opladeren får ikke noget strøm.	Tjek stikkontakten og evt. sikring i oplader.
Scooteren kører for langsomt.	Scooterens lave gear er aktiveret.	Tryk på gearkontakten.
Scooteren holder konstant med baglys.	Lyset er parkeringslys og slukkes under kørsel.	Der er ikke tale om en fejl.

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne serviceteknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremses, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, medmindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. serviceinterval-lerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde serviceintervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Motorbremse
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affjedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjergs produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at kontakte Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.