



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/  
GARANTIBEVIS**

**KABINESCOOTER  
URBAN**

TD-KS-URBAN-01-24-V01

# TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG KABINESCOOTER

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger for at du får glæde af alle de funktioner kabinescooter har. Derudover er der en trin for trin guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

*Lindebjerg*



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Introduktion .....	Side 4
Sikkerhed/forholdsregler.....	Side 5
Batteri informationer .....	Side 6
Opladning.....	Side 7
Instrumentbord .....	Side 8
Funktioner .....	Side 9-10
Få mere ud af dit batteri .....	Side 9
Sæde & Tænding .....	Side 12
Vedligehold .....	Side 13
Så langt kører din kabinescooter.....	Side 14
Fejlsøgning .....	Side 15
Radio .....	Side 16-17
Garanti og service.....	Side 18
Serviceskema.....	Side 19

# INTRODUKTION

Denne manual skal læses igennem før køretøjet tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af køretøjet m.m.r



Læs og følg alle vores sikkerheds- og advarselsoplysninger, samt vores oplysninger om installation og sikker anvendelse! Dette er den eneste måde at undgå personskaade og materielle skader på! Du må ikke ændre produktet, da produktet muligvis ikke fungerer korrekt længere! Vi påtager os intet ansvar for manglende overholdelse af disse instruktioner, og den deraf følgende skade på mennesker eller ejendom! Brugsoplysningerne er baseret på de standarder og regler, der gælder i Den Europæiske Union.

## Produktsortiment

Produkt navn	Varenr.
Urban - Rød/Hvid - 25 km/t	131081
Urban - Mat blå - 25 km/t	131084
Urban - Mat sort - 25 km/t	131082

# SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

1

## Sikkerhedsinstruktioner

- Kør ikke køretøjet hvis du er påvirket af alkohol og eller andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af køretøjet.
- Kør altid køretøjet sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek køretøjet for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk.
- Køretøjet må ikke lånes ud til personer som ikke er fortrolige med det.
- Max personvægten må aldrig overskrides.
- Sikkerhedsselen skal anvendes under kørsel, både af fører og passager.
- Lindebjerg A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og personska-der, som opstår ved forkert benyttelse.

2

## Batteri instruktioner:

**VIGTIG!** Læs opladningsinstruktionerne på side 6 før køretøjet tages i brug. Køretøjet skal sættes til opladning, når det ikke benyttes. Hvis køretøjet ikke benyttes i længere tid, skal opladeren være sat i så tit som muligt. (Max 5 dage uden opladning).

Hvis køretøjets batterier aflades helt, tager batterierne skade og levetiden forkortes væsentligt og i værste tilfælde ødelægge batterierne helt, hvilket ikke er dækket af garantien.

3

## Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på dit køretøj, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

### Dagligt:

Forsikre dig om at bremserne virker optimalt. Sæt kabinescooteren til opladning.

### Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca. 2,5 – 3 bar. Rengør plastikskjolde med en fugtig klud.

### Årligt:

Det anbefales at få serviceret dit køretøj af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis dit køretøj er ny, skal dit køretøj serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på køretøjet, herefter med 12 måneders interval.

# BATTERI INFORMATIONER

Dit køretøj er forsynet med 12V vedligeholdes frie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af model. Når batteriet er slidt og skal udskiftes, er det vigtigt at få de rigtige batterier i igen. Kontakt da Lindebjerg for mere information.

Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre i dit køretøj. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, indtil du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt og hvordan batterierne bliver opladt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter type af brug. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå max rækkevidde, som du kan læse i køretøjets specifikationer. Kører du derimod i byen med meget start og stop, vil køretøjet bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Meget start og stop, som f.eks. ved bykørsel vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Andre faktorer som spiller ind, er kulde, som påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 0 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus eller lignende, vil kræve mere strøm, og dermed nedsættes køretøjets rækkevidde.

**HUSK - Kør aldrig køretøjet helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.**

# SÅDAN OPLADER DU DIN LINDEBJERG KABINESCOOTER

**HUSK - Kør aldrig køretøjet helt tør for strøm, dette kan ødelægge batterierne og kræve en udskiftning. Oplad altid efter endt kørsel.**

## Opladning

For at genoplade køretøjets batterier skal du benytte den medfølgende oplader, som følger med ved levering. Forbind opladningshåndtaget i stikket bag opladningsklappen, bag på kabinescooteren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i.

*BEMÆRK! Bruger du en forlængerledning, skal du være ekstra opmærksom på samlingen mellem opladeren og forlængerledning ikke bliver udsat for vand og fugt.*



**Ladekabel : 135178 - Ladekabel til Urban/Country 230V**

Du skal sætte køretøjet til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv, når batteriet er fuldt opladt. Så du kan sagtens lade scooteren stå til strøm hele tiden.

Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, eller opmagasineres, skal der stadig tilsluttes oplader, således batteriet ikke tager skade. Hvis ikke dette er muligt, skal batterierne tages fra systemet. Dette anbefales at få gjort af en Lindebjerg tekniker. Lad ikke køretøjet stå uden oplader tilsluttet i mere en 5 dage. Under opladning skal du slukke for dit køretøj. Køretøjets batteriindikator vil ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel.

## Strømindikator

På opladningshåndtaget, sidder er en rød lysdiode. Denne diode indikerer om der er sat strøm til opladeren. Er der strøm til opladeren, lyser den rødt. Er der ikke strøm til opladeren lyser den ikke. Strømindikatoren vil altid lyse rødt, ligemeget om kabinescooteren er fuldt opladt eller ej.





# INSTRUMENTBORD

## Langtlys indikator

Scooteren er udstyret med lys herunder også langtlys istedet for kun positionslys. Dette ikon lyser blåt, hvis det lange lys er aktiveret.

## Gearindikator

Her vil D / N / R, lyse efter hvilket gear du er i.  
„D“ står for “drive” som betyder fremad kørsel.  
„R“ står for reverse som betyder bak.  
„N“ står for neutral og kaldes og frigear.

## Blinklys indikator

Her ses status på blinklys til venstre.

## Blinklys indikator

Her ses status på blinklys til højre.



## Batteriindikator

Scooterens batteriindikator vises op instrumentbordet. Indikatoren slukkes fra venstre mod højre.

## ODO/TRIP

ODO tælleren viser din kørte total distance.  
TRIP tælleren, viser hvor langt du har kørt siden de tændte scooteren.

## Hastighed

Her vises din aktuelle hastighed.



# FUNKTIONER

## Langt lys

Scooterens lange lys tændes og slukkes ved tryk på denne knap. Er det lange lys tændt, kan det ses i scooterens instrumentbord



## Blinklys

Scooterens blinklys tændes ved at trykke til højre eller venstre på knappen, og deaktiveres ved at trykke på midten af knappen. Samtidig vises det i instrumentbordet når scooterens blinklys er aktiveret.

## Dødmansknop

Trykker du på denne knap, stopper scooteren med det samme og kan ikke køre. Trykker du på den igen, slår den fra og kan køre igen.



## Lys

Scooterens lys tændes ved at rykke denne knap til venstre og til højre for at deaktivere.

## Kontakt til horn

Scooterens horn kan aktiveres ved at holde knappen nede

# FUNKTIONER

## Indikator for, frem/Neutral position

Brug denne knap til at skifte mellem fremad, bak eller neutral. Det aktuelle valg kan ses i scooterens instrumentbord. D" står for "drive" som betyder fremad kørsel. „R“ står for reverse som betyder bak. „N“ står for neutral og kaldes og frigear.



**Kontakt til visker**  
Scooterens visker aktiveres på denne knap.

**Kontakt til blæser**  
Scooteren er udstyret med blæser, den aktiveres ved tryk på knappen.

## Låse funktion til bremses

Scooterens bremses kan låses ved at trykke bremsen ind og herefter låse ved at trykke denne ind. For at løsne bremsen igen, trykkes bremsen ind.



## Få mere ud af dit batteri

Når du begynder din kørsel og dermed begynder, at bruge af kapaciteten på batteriet vil du se de farvede felter begynder at slukke, startende med de grønne. Når kun de røde er tilbage skal du søge mod et sted hvor du kan genoplade batteriet. Du skal altid genoplade batteriet efter hver køretur. Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu  
klar til  
at køre





# SÆDE & TÆNDING

## 6 Tænding

Scoterens nøgle isættes tændingslåsen, som er placeret tilhøjre for styret. Herefter drejes nøglen mod højre og instrumentbordet starter op og det er nu muligt at benytte scooteren og dens funktioner. Nøglen drejes mod venstre for at slukke systemet.



## 6 Sæde

Scoterens nøgle isættes tændingslåsen, som er placeret tilhøjre for styret. Herefter drejes nøglen mod højre og instrumentbordet starter op og det er nu muligt at benytte scooteren og dens funktioner. Nøglen drejes mod venstre for at slukke systemet.

**Håndtag til position justering**  
Juster afstanden til instrumentbordet, ved at trække op i håndtaget og ryk sædet frem eller tilbage for at tilpasse din position.



**Sele**  
Scooteren er udstyret med sele, for optimal beskyttelse under kørsel.

**Håndtag til justering af ryg**  
Juster sæderyggen ved at trække op i håndtaget. Herved kan sæderyggen justeres frem eller tilbage alt efter behov.

# VEDLIGEHOLD

6

## Vedligehold

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter, er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

### Dagligt:

Forsikre dig at bremserne virker optimalt.  
Forsikre dig at scooteren er ladet helt op.

### Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca 2,5 – 3 bar.  
Rengør sæde og plastikskjolde med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

### Årligt:

Det anbefales at få serviceret din scooter af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned. Se dit service og garantibevis. Bemærk at hvis din scooter er ny, skal din scooter serviceres efter 9. måneder for at opretholde garantien på scooteren, herefter med 12 måneders interval.

# SÅ LANGT KØRER DIN KABINESCOOTER

URBAN (25 KM/T) 1000 W

STANDARD 72V - 45AH X 6

PREMIUM 72V - 52AH X 6

Perfekte forhold

OP TIL 60 KM

OP TIL 80 KM

Skærpede forhold

OP TIL 45 KM

OP TIL 60 KM

Hårde forhold

OP TIL 30 KM

OP TIL 40 KM

## PERFEKTE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "PERFEKTE FORHOLD"  
OVENSTÅENDE BEREKNINGER.

VIND: VINDSTILLE  
VÆGT: 80 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE  
TEMPERATUR: 20 °C  
DÆKTRYK: ANBEFALET  
TERRÆN: FLADT  
KØRSEL: LANDEVEJ

## SKÆRPEDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "SKÆRPEDE FORHOLD"  
OVENSTÅENDE BEREKNINGER.

VIND: < 5 M/S  
VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE  
TEMPERATUR: 8 °C  
DÆKTRYK: ANBEFALET  
TERRÆN: FLADT  
KØRSEL: BYKØRSEL

## HÅRDE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR "HÅRDE FORHOLD"  
OVENSTÅENDE BEREKNINGER.


VIND: < 10 M/S  
VÆGT: 120 KG INKL. OVERTØJ OG BAGAGE  
TEMPERATUR: 0 °C  
DÆKTRYK: LAVT DÆKTRYK  
TERRÆN: KUPERET  
KØRSEL: BYKØRSEL

# FEJLSØGNING

Problem	Fejl	Løsning
Scooteren kan ikke køre.	Parkeringsbremsen til højre for sædet, er ikke helt i bund.	Træk håndbremsen og vær ekstra opmærksom på den bliver trykket helt i bund.
Scooteren kan ikke køre	En af bremserne er aktiveret	Tjek alle bremseslået fra, både bremses på styrret og parkeringsbremsen.
Scooteren kan ikke køre.	Dødmandsknappen er aktiveret	Tryk på dødmands knappen, som sidder på højre side af styrret. (Se side 7 side)
Scooteren kan ikke tænde. Der kommer ikke lys i displayet.	Fejl ved opladning	Oplad scooteren igen, kan den stadig ikke tænde, så evt. kontakt Lindebjerg
Scooteren kan ikke tænde. Der kommer ikke lys i displayet.	Hovedafbryder er deaktiveret.	Ved siden af et opladerstik, sidder der en hovedafbryder, tjek at den er slået til.
Scooteren stopper pludseligt under kørsel.	Dårlig batteriforbindelse.	Tjek batteristik. Evt. kontakt Lindebjerg.
Scooteren kører kort på en opladning.	Batteriet aflades for hurtigt pga. slitage, blødt underlag, kulde, eller meget start og stop.	Genoplad batterierne. Kør en tur på hårdt underlag. Skift evt. batterierne.
Scooteren vil ikke lade op.	Aflæsningsfejl.	Ladestatus skal ses på selve opladeren.
Scooteren vil ikke lade op, men kører fint.	Sikring er sprunget i opladeren.	Tjek sikring i oplader, evt. kontakt Lindebjerg.
Opladeren virker ikke.	Opladeren får ikke noget strøm.	Tjek stikkontakten og evt. sikring i oplader.



# RADIO

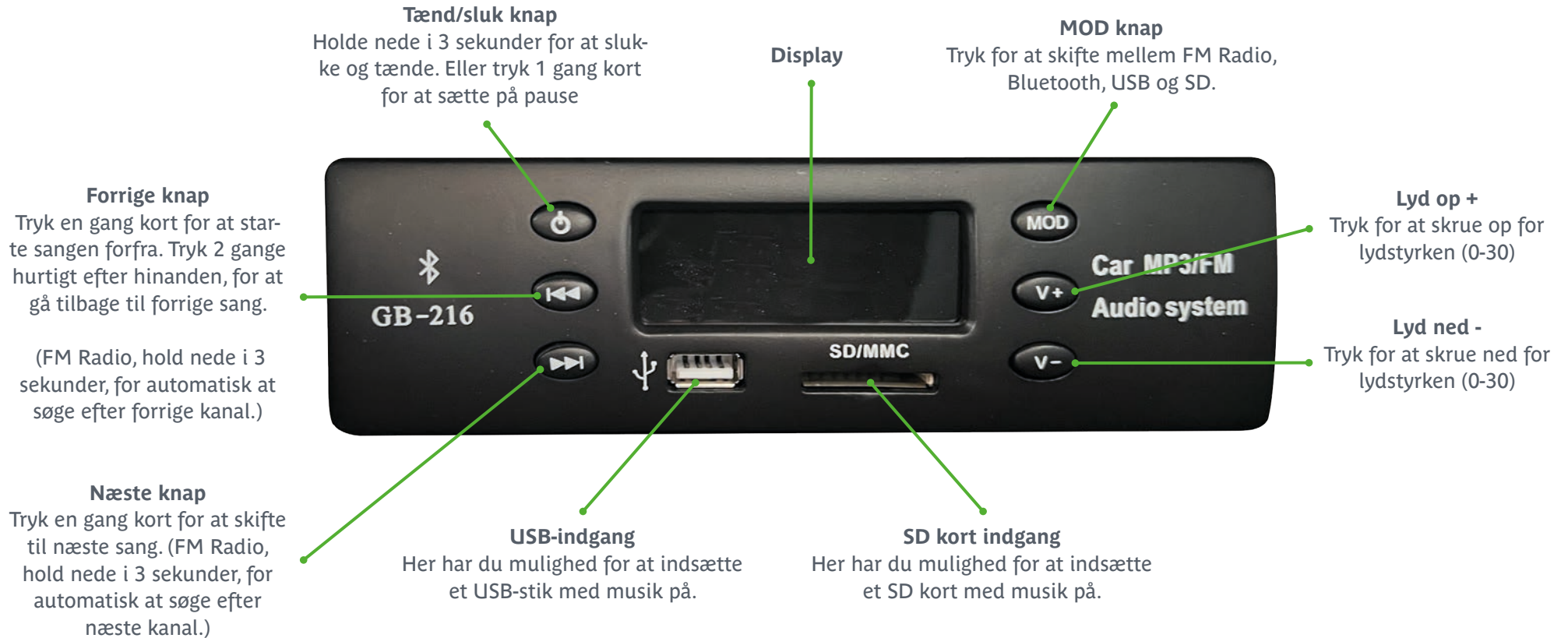

# RADIO

7

## Tilkoble Bluetooth

1. Tænd radioen og tryk på „MOD“ knappen, indtil teksten „BLUE“ blinker i displayet. Nu er du klar til at tilkoble din telefon.
2. Åben Bluetooth indstillinger på din telefon og tilføj en ny enhed. Radioens navn vil oftest være „Bluetooth“. Vælg enheden og tryk på tilføj.
3. Når teksten „BLUE“ i displayet stopper med at blinke, er den tilføjet korrekt. Du kan nu spille musik fra din telefon. (Husk at skrue op for lyden, både på din telefon og på „Lyd op +“ knappen på radioen.)

Nyere telefoner vil automatisk tilkoble Bluetooth, hvis de har været tilkoblet en gang. Lige så snart du tænder radioen, vil den automatisk tilkoble Bluetooth.

8

## FM-Radio

1. Tænd radioen og tryk på „MOD“ knappen, indtil teksten „LOD“ eller frekvenser f.eks. 87,5 kommer frem i displayet.

### Manuelt vælg frekvens

Tryk en gang kort tryk på enten „Næste“ eller „Forrige“ knappen for manuelt at vælge frekvens.

### Automatisk frekvensøgning

Hold inde i 3 sekunder på enten „Næste“ eller „Forrige“ for automatisk at søge efter den næste kanal.

*OBS! FM-signalet er et begrænset signal, derfor vil det nogle steder i Danmark ikke være muligt at finde FM kanaler.*

9

## USB og SD

1. Indsæt et USB-stik eller et SD kort i radioen. Tænd radioen og tryk på „MOD“ knappen, indtil teksten „USB“ eller „SD“ kommer frem i displayet.
2. Herefter begynder den automatisk afspilningen af musikken på dit USB-stik eller SD kort. I displayet viser den hvor langt du er inde i sangen.
3. Brug knapperne „Næste“ og „Forrige“ til at skifte sang. Når du trykker „Næste“ eller „Forrige“ vises sangens nummer i displayet, før afspilningen automatisk begynder.

*OBS! Radioen kan kun afspille mp3 og wav filer.*

# GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige el-scooter til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din el-scooter i længere tid.

## Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremses, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

## 3 års garantiordning

Din el-scooter leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes, skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

## Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores tekniker din el-scooter for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

- Motorophæng
- Bagaksel
- Elnet
- Sædet
- Styretøj
- Dæktryk
- Lysnettet
- Parkeringsbremse
- Instrumentbordet
- Affedringen

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

# SERVICESKEMA

Første service ligger 9 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Stelnr.: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

▼ 1 år ▼

## SERVICE 1

9 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 4

45 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 2

21 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 5

57 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 3

33 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 6

69 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S  
Stensgårdvej 14  
5500 Middelfart



63 15 00 00



[mail@lindebjerg.dk](mailto:mail@lindebjerg.dk)

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.